

Gebrauchsanweisung für Einlagen individuelle Sonderanfertigung ^{© by Media}

Informationen / Sicherheitshinweise

1. Einsatz und Gebrauch

- Ihre Einlagen sind Hilfsmittel, die für Sie nach modernster Computerfrässtechnik angefertigt wurden.
- Legen Sie Ihre Einlagen nur in dafür geeignetes Schuhwerk (entfernen Sie bitte eventuell inliegende lose Sohlen)
- Eine langsame Gewöhnung Ihrer Füße an die Einlagen kann nötig sein, steigern Sie daher vorsichtig die Tragezeit.

2. Schuh und Einlagentyp

- Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, müssen Schuhe und Einlagen aufeinander abgestimmt sein.
- Beste Voraussetzungen erhalten Sie durch einlagentaugliche Schuhe, die entweder dafür gemacht oder mit herausnehmbarem Fußbett gefertigt wurden.
- Eine gute Passform der Schuhe ist Voraussetzung für die erfolgreiche Versorgung.
- Achten Sie auf guten Fersensitz, z.B. durch Schnürung oder Klettverschluss.
- Die Schuhe dürfen nicht zu eng sein (Längenzugabe ca. 1,5 cm)
- Bei einigen Schuhherstellern und Schuhtypen sind genau an - bzw. - eingepasste Einlagenformen zu erstellen.

3. Reinigung und Pflege

- Lederbezogene Einlagen sind nach dem Gebrauch zum Lüften aus den Schuhen zu nehmen und langsam zu trocknen. Keinen direkten Wärmequellen aussetzen.
- Kunststoff und Microfaserbezüge können mit einem feuchten Tuch unter Zugabe eines leichten Desinfektionsmittels oder Seifenlauge abgerieben werden.
- Die Einlagen dürfen nicht über 50 °C erhitzt werden.
- Da nur geprüfte Materialien zum Einsatz kommen, sind allergische Reaktionen selten, falls sie dennoch auftreten, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung.

Lassen Sie Ihre Einlagen regelmäßig kostenlos bei uns kontrollieren, um möglichen Verschleiß bezüglich Stützung und Dämpfung frühzeitig zu erkennen. (vor allem bei Kindern (Wachstum) und speziellen Indikationen (z.B. Diabetes)).

Weitere Informationen und Kontakt erhalten Sie auch unter www.orthogoll.de

ORTH  GOLL GMBH

Orthopädie - Schuhtechnik

70
Jahre
1932 - 2002

Ickstattstraße 30 · 80469 München

Fon: (0 89) 2 01 23 44

Fax: (0 89) 2 01 23 14

Internet: www.orthogoll.de

Sonderanfertigung n. M. P. G.